



Innovafem

Ciência aplicada à saúde íntima feminina

TCP HEALTH SOLUTIONS

INOVAÇÃO EM SAÚDE DESDE 2013

Desde 2013, a **TCP Health Solutions** destaca-se no setor médico-hospitalar, fornecendo produtos e equipamentos cirúrgicos com foco em inovação e segurança. Tornou-se referência nacional, garantindo qualidade e confiança a hospitais, clínicas e profissionais da saúde no Brasil.



O que é o InnovaFem?

O **Innovafem** é uma tecnologia bioativa de termoativação transdérmica, que utiliza energia térmica de precisão para promover bioestimulação celular e reorganização dérmica, devolvendo firmeza, sensibilidade e vitalidade íntima sem medicamentos.

Principais indicações:

- Rejuvenescimento íntimo
- Dor Pélvica
- Flacidez
- Ressecamento vaginal
- Incontinência urinária
- Falta de sensibilidade
- Dificuldade de orgasmos





Como a radiofrequência eletromagnética termal atua na derme

Penetração seletiva:




O calor gerado pelos pinos condutores do eletrodo fracionado atinge seletivamente as camadas mais profundas da derme, sem causar dano à epiderme.

Reorganização matricial:

Espessamento e reorganização da matriz extracelular dérmica, com distribuição mais uniforme de melanossomos e melhora da arquitetura tecidual.

Otimização circulatória:

Estímulo à microcirculação local, favorecendo a oxigenação tecidual, a nutrição celular e o metabolismo dérmico.

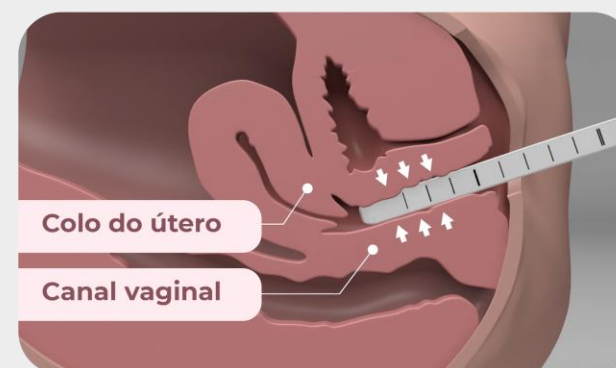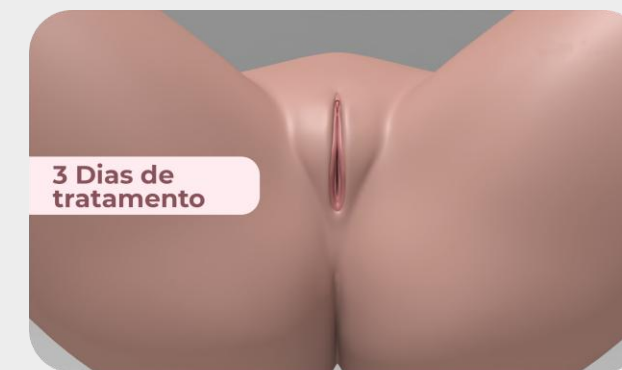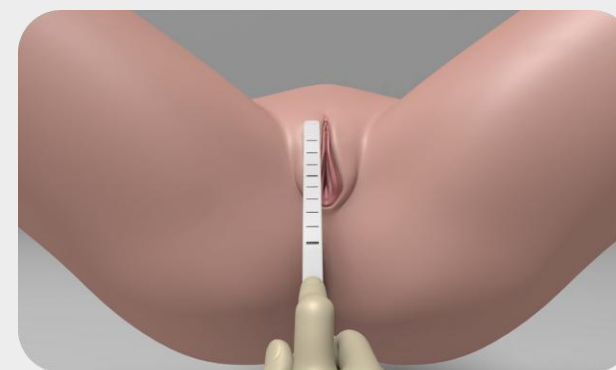


Mecanismo de ação



01.

Aquecimento Controlado


Temperatura estabilizada em 42°C para indução de colágeno e reorganização das fibras dérmicas.

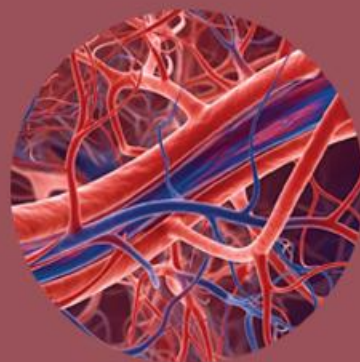

02.

Remodelação Tecidual


Região vulvovaginal mais firme, hidratada, sensível e esteticamente uniforme.

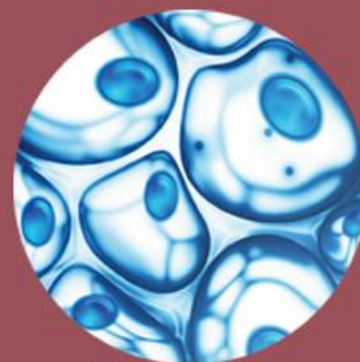

03.

Estímulo Celular

Ativação de fibroblastos e produção de novas fibras de colágeno e elastina.

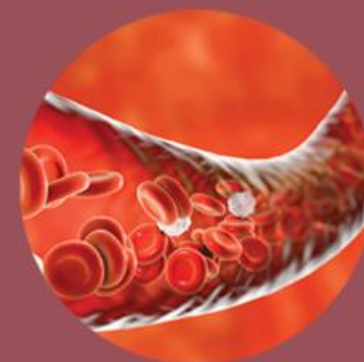

04.

Melhora Circulatória

Aumento da microcirculação local, potencializando a oxigenação tecidual.

RESULTADOS

Redução da Flacidez

Melhora da firmeza e sustentação dos tecidos vulvares (grandes e pequenos lábios).

Textura Cutânea

Melhora da textura, elasticidade e aspecto geral da pele da região íntima.

Clareamento

Melhora da uniformidade da coloração da pele íntima e redução de hiperpigmentações.

Tônus Muscular

Fortalecimento do assoalho pélvico, com potencial no controle da incontinência urinária.

Lubrificação

Estimulação fisiológica da lubrificação vaginal, favorecendo o conforto e a resposta sexual.

Contração Vaginal

Melhora da contração muscular e aumento da percepção sensorial durante o contato íntimo.

Fluxograma de anamnese

HISTÓRICO GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO

Gestações, partos, DIU, infecções prévias.

HISTÓRICO URINÁRIO E FUNCIONAL

Incontinência urinária de esforço, dor pélvica, lubrificação.

AVALIAÇÃO DAS EXPECTATIVAS

O que espera do procedimento?
Entende as limitações?

IDENTIFICAÇÃO E QUEIXA PRINCIPAL

O que motivou a paciente a procurar o tratamento?

HISTÓRICO DERMATOLÓGICO LOCAL

Tendência a hiperpigmentação, queloides, líquen, psoríase.

USO DE MEDICAMENTOS E CONDIÇÕES SISTÊMICAS

Diabetes, doenças autoimunes, anticoagulação.

CONSENTIMENTO ESCLARECIDO

Explicar protocolo, cuidados, número de sessões e possíveis intercorrências.



Realização do Procedimento


- TEMPERATURA ALVO: 42°C
- MODO: RF THERMAL
- TEMPO POR SESSÃO: 7 - 26 min
- QUANTIDADE DE SESSÕES: 3 - 5 (a cada 20 dias)



Parâmetros de tempo e sequência

Aplicação Interna

Cerca de 7 minutos, priorizando áreas com mais frouxidão e respeitando o conforto térmico da paciente.

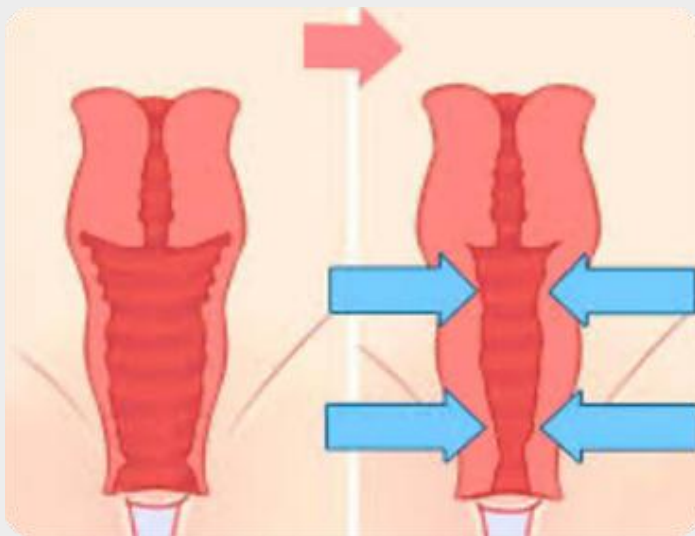

Aplicação Externa

Aproximadamente 15 minutos, com movimentos controlados abrangendo toda a superfície cutânea dos grandes e pequenos lábios.



Casos de Assimetria

Aproximadamente 15 minutos, com movimentos controlados abrangendo toda a superfície cutânea dos grandes e pequenos lábios.





Recuperação rápida e cuidados

O protocolo **INNOVAFEM** se destaca entre as tecnologias íntimas por não exigir tempo prolongado de recuperação, oferecendo um downtime praticamente inexistente.

Se a paciente relatar leve edema, hiperemia ou aumento transitório da sensibilidade local, efeitos fisiológicos esperados pelo estímulo térmico. Recomenda-se evitar relações sexuais por aproximadamente 48 horas.

1. Retomar atividades diárias normalmente

2. Manter a higiene íntima habitual

3. Evitar roupas íntimas justas nas primeiras 24h


4. Suspendar relações sexuais por até 48h se houver desconforto.





Contraindicações

- Gestação confirmada ou suspeita.
- Infecções ativas na região genital (vaginítes, vulvítes, cervicítes, bartolínites não tratadas).
- Doenças dermatológicas ulceradas ou infecciosas ativas na área a ser tratada.
- Neoplasias ginecológicas ou urológicas não tratadas.
- Presença de marcapasso ou dispositivos eletrônicos implantáveis
- Distúrbios graves de coagulação ou uso de anticoagulantes sem liberação médica
- Doenças autoimunes em fase aguda descompensada
- Diu de cobre a ausência de estudos clínicos robustos impossibilita afirmar sua total segurança.

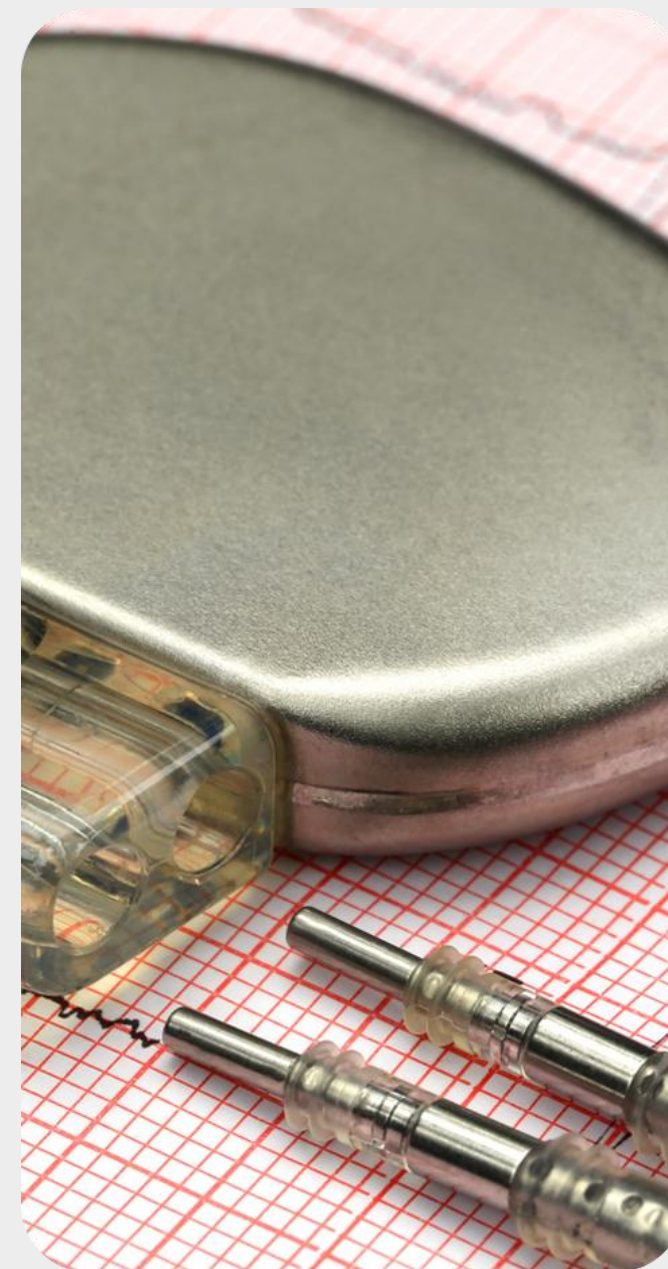

CASOS CLÍNICOS - (45 ANOS) RESULTADO DE 3 SESSÕES



Quadro clínico apresentado:

Flacidez, Incontinência urinária, Lábios internos grandes a ponto de causar dor.

Protocolo Aplicado

Tempos: 7min Interno e 15min Externo

Temperatura: 42°C

RESULTADOS OBTIDOS

- Melhora expressiva na estética vulvar externa
- Visível melhora do contorno
- Diminuição dos lábios internos
- Redução significativa da incontinência urinária de esforço
- Aumento da lubrificação vaginal
- Intensificação da sensibilidade interna

CASOS CLÍNICOS - (38 ANOS) RESULTADO DE 4 SESSÕES



Quadro clínico apresentado:

Incontinência urinária, Dor na relação sexual e Laceração do períneo.

Protocolo Aplicado

Tempos: 7min Interno, 15min Externo e 4min Vestíbulo Vaginal

Temperatura: 42°C

RESULTADOS OBTIDOS

- Melhora expressiva na estética vulvar externa
- Visível uniformização do contorno e da coloração local
- Redução significativa da incontinência urinária de esforço
- Aumento da lubrificação vaginal
- Intensificação da sensibilidade interna
- Melhora na qualidade da resposta sexual

CASOS CLÍNICOS - (47 ANOS) RESULTADO DE 3 SESSÕES



Quadro clínico apresentado:

Flacidez, falta de sensibilidade, falta de lubrificação e dificuldade de orgasmo.

Protocolo Aplicado

Tempos: 7min Interno e 15min Externo.

Temperatura: 42°C

RESULTADOS OBTIDOS

- Melhora expressiva na estética vulvar externa
- Aumento perceptível da lubrificação íntima
- Intensificação da sensibilidade durante o ato sexual
- Maior facilidade para alcançar o orgasmo
- Mudanças notadas positivamente pelo parceiro

CASOS CLÍNICOS - (43 ANOS) RESULTADO DE 3 SESSÕES



Quadro clínico apresentado:

Lábios internos maiores, falta de lubrificação e incontinência Urinária.

Protocolo Aplicado

Tempos: 7min Interno e 15min Externo.

Temperatura: 42°C

RESULTADOS OBTIDOS

- Melhora expressiva na estética vulvar externa
- Notável uniformização do contorno
- Clareamento progressivo da região
- Redução expressiva da incontinência urinária de esforço
- Aumento da lubrificação vaginal
- Intensificação da sensibilidade interna

**Acesse o link na BIO e fale com
nossos especialistas**

11 94784-0039

comercial@tcphealth.com.br

www.innovafemtcp.com.br

